

LAS MEDIAS FARMALASTIC NO SE COLOCAN COMO UNAS MEDIAS NORMALES

Es necesario seguir las instrucciones de colocación para garantizar una **correcta acción terapéutica y evitar posibles rotura**, ya que son unas medias delicadas.

CONSEJO:


Lave las medias antes de ponérselas por primera vez. Lea las instrucciones de lavado en el reverso.

Cada vez que se las ponga quítese los anillos y pulseras o utilice guantes.

Póngase las medias por la mañana, siempre y cuando no tenga las piernas hinchadas. No repare usted mismo ninguna rotura de la prenda.

CÓMO COLOCARSE LAS MEDIAS

1 Da la vuelta a la media colocándola del revés, excepto puntera.

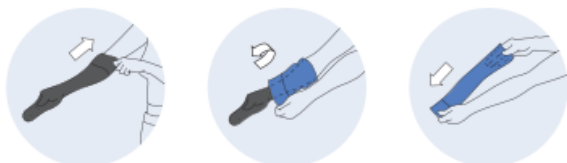

2 Introduce el pie hasta pasar el talón y sube la media poco a poco.



3 Procura no tirar de la blonda al subir la media hasta justo dos dedos por debajo de la ingle.*



*En el caso del panty, cuando lo hayas subido hasta la rodilla, repite todos los pasos en la segunda pierna y ponte de pie para terminar de subirlo. Procura no tirar de la cinturilla hasta que llegues a la cintura.

Puede consultar las instrucciones de colocación entrando en www.farmalastic.cinfa.com o escaneando el código correspondiente a su prenda con su teléfono móvil.

MEDIA CORTA



MEDIA LARGA



PANTY



LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN SE UTILIZAN PARA EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES FLEBOLÓGICAS Y LINFOLÓGICAS DE LAS PIERNAS.

LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN EJERCEN MAYOR PRESIÓN EN EL TOBILLO Y ÉSTA DISMINUYE GRADUALMENTE A LO LARGO DE LA PIERNA, ACELERANDO EL FLUJO SANGUÍNEO Y MEJORANDO EL RETORNO VENOSO.

MEDIAS TERAPÉUTICAS FARMALASTIC INTELLIGENT PLUS

⚠ Use las medias de compresión solo después de consultar a su médico. Asegure el éxito de su tratamiento usándolas a diario y sometiéndose a controles médicos periódicos. Solo especialistas con formación médica o farmacéutica pueden suministrar estas medias. Su farmacéutico le aconsejará sobre cómo ponerse correctamente las medias de compresión. Si al usarlas siente un dolor agudo en las piernas o se le irrita la piel, consulte de inmediato a un médico. Las reacciones cutáneas en la zona de las bandas de silicona se pueden prevenir cambiando ligeramente de posición la banda de silicona varias veces al día. Probamos nuestros productos en el marco de una garantía de calidad integral. Si, aun así, tiene una reclamación, póngase en contacto con su farmacéutico. Si las medias tienen daños, no las repare usted mismo/a. Le recomendamos que las lleve a la farmacia dónde las compró. Los nódulos de fibra que puedan formarse por la fricción con otras prendas de vestir no reducen la calidad de las medias.

LAVADO Y MANTENIMIENTO MEDIAS FARMALASTIC INTELLIGENT PLUS

El producto está preparado para usarse directamente. Sin embargo, se recomienda lavar el producto antes de usarlo por primera vez. Después, lávelo todos los días a mano o en el ciclo de lavado delicado de la lavadora. Lave las medias por separado con un detergente suave, pero sin suavizante, a una temperatura máxima de 40 °C, y aclárelas bien. Las medias se pueden centrifugar suavemente, pero no se pueden retorcer para escurridlas. Seque sus medias terapéuticas al aire o en el ciclo de ropa delicada de su secadora, pero no las coloque sobre la calefacción ni las exponga a luz solar directa. Nunca planche las medias. Para mantener la eficacia de sus medias, no utilice detergentes químicos, gasolina ni suavizante. Estas sustancias debilitan la tela de punto. Las medias de compresión soportan bastante bien grasas y aceites, pero no deben entrar en contacto con ungüentos. En general, las medias con bandas de silicona no deben entrar en contacto con disolventes, ungüentos, lociones de lavado hidratantes ni cremas corporales. De lo contrario, la adherencia de las bandas puede perderse permanentemente (también el vello de las piernas y la piel seca pueden limitar el funcionamiento de las bandas adherentes). Almacene las medias secas y protegidas del sol y del calor, en el envase original si es posible.

GARANTÍA: Con un almacenaje adecuado, la durabilidad de las medias terapéuticas está concebida para 3 años. A eso se le añade el tiempo de uso; si se usan de forma regular y se cuidan adecuadamente, la eficacia terapéutica está limitada a 6 meses. En principio, se excluyen de la garantía los defectos que se produzcan por el desgaste normal o el uso inadecuado. Se considera también uso indebido cualquier modificación posterior del producto que no haya sido realizada por la empresa fabricante. El producto está diseñado para el tratamiento de un solo paciente. Si se entrega a otras personas para su reutilización, el fabricante queda liberado de cualquier responsabilidad sobre el producto. **ELIMINACIÓN:** Al final de su vida útil, deseche el producto de acuerdo con la normativa local.

INDICACIONES

Mejora de los síntomas venosos y la calidad de vida en las enfermedades venosas crónicas. Insuficiencia venosa crónica. Varices. Varicosis primaria y secundaria. Tras intervenciones quirúrgicas venosas y como coadyuvante en escleroterapia. Malformaciones venosas. Prevención y tratamiento de edemas venosos, postraumáticos y postoperatorios. Edemas, alteraciones venosas y síndrome de congestión pélvico durante el embarazo. Edema causado por el trabajo (empleos que exijan estar mucho tiempo de pie o sentado). Prevención y tratamiento de la trombosis venosa en pacientes móviles (no encamados). Trombosis venosa. Síndrome posttrombótico. Linfedema y lipedema. Estados congestivos debidos a inmovilidad (p.e. en paresias o parálisis parciales de la extremidad inferior, síndrome congestivo artrógeno). Tratamiento y reducción del dolor en úlceras venosas y prevención de recidivas. Tratamiento de úlceras de origen venoso y arterioso (consulte las contraindicaciones). Prevención y tratamiento de alteraciones cutáneas venosas (p.e. ecema y pigmentación). Dermatitis inflamatoria en las piernas. Estado posterior a quemaduras. Tratamiento de cicatrices.

CONTRAINDICACIONES, RIESGOS Y EFECTOS SECUNDARIOS

Absolutas: enfermedad obstructiva arterial periférica en estado avanzado, Insuficiencia cardiaca descompensada, Flebitis séptica, Flegmasia cerúlea dolens.

Relativas: alergia a los materiales de la media. Dermatitis húmedas. Disestesias (p.e. neuropatía periférica en estado avanzado por diabetes mellitus), Poliartritis crónica, Trastornos graves de la sensibilidad en las extremidades.

⚠ **Riesgos y efectos secundarios:** En caso de piel sensible, las medias de compresión pueden causar picor y problemas cutáneos. Por lo tanto, se recomienda un cuidado adecuado de la piel. Si presenta los siguientes síntomas, quítese inmediatamente las medias y consulte con su médico sobre la continuación del tratamiento: Coloración azul o blanca de los dedos de los pies, trastornos de la sensibilidad y entumecimiento, aumento del dolor, dificultad para respirar y sudoración, limitación aguda del movimiento.

Obligación de notificación: Debido a las disposiciones reglamentarias de la UE, los pacientes y usuarios tienen la obligación de notificar todo acontecimiento grave asociado al uso de un producto sanitario tanto al fabricante como a la autoridad nacional competente sin demora.

LAVADO



OEKO-TEX®
STANDARD 100
95-0-1094 Hohenstein MTX
www.oeko-tex.com

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg
(Alemania)

Distribuido por:

cinfa

Laboratorios Cinfa, S.A.
Olaz-Chipi, 10 P.I. Areta
31620 Huarte (Navarra)
ESPAÑA
www.cinfa.com