

## LOS CALCETINES EJECUTIVOS FARMALASTIC NOVUM NO SE COLOCAN COMO UNOS CALCETINES NORMALES


Es necesario seguir las instrucciones de colocación para garantizar una **correcta acción terapéutica y evitar posibles roturas**.

### CONSEJO:


- Lava los calcetines antes de ponértelos por primera vez. Lee las instrucciones de lavado en el reverso.
- Cada vez que te los pongas quítate los anillos y pulseras o utiliza guantes.
- Ponte los calcetines por la mañana, siempre y cuando no tengas las piernas hinchadas.

## INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN


**1.** Da la vuelta al calcetín colocándolo del revés, excepto la puntera.

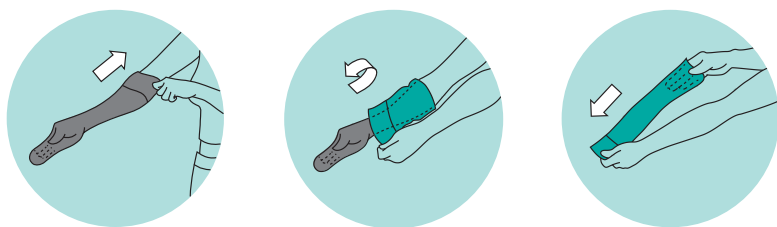

**2.** Introduce el pie hasta pasar el talón y sube el calcetín poco a poco.

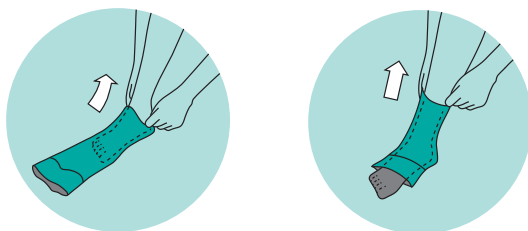

**3.** Procura no tirar del puño del calcetín al subirlo hasta dos dedos por debajo de la rodilla.

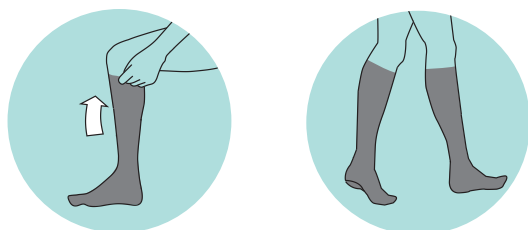

## MANTENIMIENTO CALCETINES EJECUTIVOS FARMALASTIC NOVUM

### LAVADO:

Lava los calcetines de compresión solos antes del primer uso. Después, lávalos cada 1 ó 2 usos. Usa un detergente suave sin suavizante y lava las prendas del revés. Es recomendable usar una red de lavado y aclarar bien los calcetines, pero sin retorcerlos, para eliminar el exceso de agua. Deja secar al aire sin exponer al sol ni a otras fuentes de calor (radiadores).

### MANTENIMIENTO:

Para conservarlos en buen estado es aconsejable guardarlos en un lugar seco sin exponer al sol. La posible formación de pequeños nudos de fibras es causada por el rozamiento con otras prendas de vestir o calzado y no afectan a la calidad del calcetín. Es imprescindible realizar con regularidad la pedicura y llevar calzado adecuado en perfecto estado. Quedan excluidos de la garantía los vicios que resulten del desgaste normal o de un uso inadecuado. Por uso inadecuado se entiende también una modificación posterior del producto que no haya sido realizada por el fabricante. Con un almacenaje adecuado, la durabilidad de los calcetines de compresión está concebida para 5 años. Al usarlas con regularidad y cuidarlas debidamente la eficacia terapéutica está limitada a 6 meses. El producto ha sido concebido para ser utilizado por un solo paciente.

### INDICACIONES:

Insuficiencia venosa crónica. Varicosis primaria y secundaria. Edema. Hinchazones edematosas de causas diversas, incluso postraumáticas y/o postoperatorias. Tromboflebitis y como coadyuvante en caso de flebotrombosis. Síndrome postrombótico. Tras intervenciones quirúrgicas venosas y como coadyuvante en escleroterapia. Linfedema y lipedema. Angiodisplasia. Estados congestivos debidos a inmovilidad (p.e. en paresias o parálisis parciales de la extremidad inferior, síndrome congestivo artrógeno). Profilaxis de la trombosis y de las ulceraciones venosas en caso de no tolerancia a la compresión fuerte.

### CONTRAINDICACIONES:

**Absolutas:** enfermedad obstructiva arterial periférica en estado avanzado. Insuficiencia cardiaca descompensada. Flebitis séptica. Flegmasía cerúlea dolens.

**Relativas:** alergia a los materiales de la media. Dermatitis húmedas. Disestesias (p.e. neuropatía periférica en estado avanzado por diabetes mellitus). Poliartritis crónica. Trastornos graves de la sensibilidad en las extremidades.

**Riesgos y efectos secundarios:** las medias de compresión que no se ajusten perfectamente pueden producir necrosis cutáneas, daños por presión en los nervios periféricos, así como trombosis venosas profundas en las piernas.



EEC021532/0517