

## LAS MEDIAS FARMALASTIC NOVUM NO SE COLOCAN COMO UNAS MEDIAS NORMALES


Es necesario seguir las instrucciones de colocación para garantizar una **correcta acción terapéutica** y evitar posibles roturas, ya que son unas medias delicadas.

### CONSEJO:


- Lava las medias antes de ponértelas por primera vez. Lee las instrucciones de lavado en el reverso.
- Cada vez que te las pongas quítate los anillos y pulseras o utiliza guantes.
- Ponte las medias por la mañana, siempre y cuando no tengas las piernas hinchadas.

## INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN


**1** Da la vuelta a la media colocándola del revés, excepto la puntera.

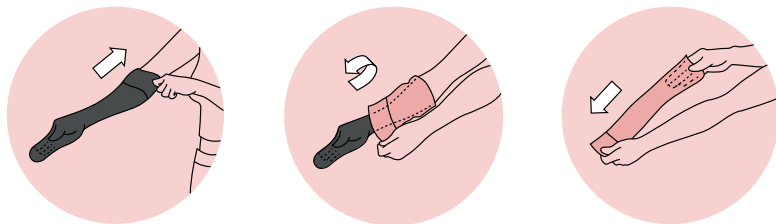

**2** Introduce el pie hasta pasar el talón y sube la media poco a poco.

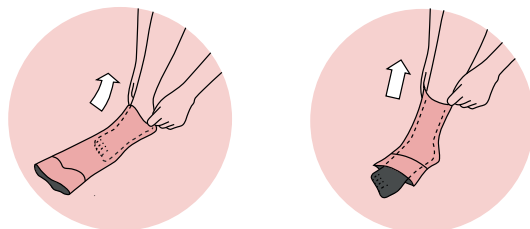

**3** Procura no tirar de la blonda al subir la media hasta justo dos dedos por debajo de la ingle.\*

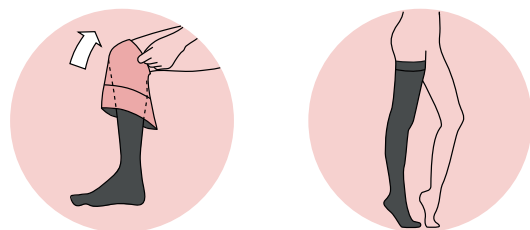

\* En el caso del panty, cuando lo hayas subido hasta la rodilla, repite todos los pasos en la segunda pierna y ponte de pie para terminar de subirlo. Procura no tirar de la cinturilla hasta que llegues a la cintura.

## GAMA FARMALASTIC NOVUM

Innovación en el cuidado integral de las piernas. Pide asesoramiento a tu farmacéutico o médico y encuentra la opción más adecuada.



Medias terapéuticas

Geles

Complemento alimenticio

## MANTENIMIENTO MEDIAS FARMALASTIC NOVUM

**LAVADO:** Lava las medias de compresión antes de estrenarlas. Después, lávalas tras cada uso, a mano o en un programa de lavado para prendas delicadas, sin suavizante y con la prenda del revés. Es recomendable usar una red de lavado y aclarar bien la media, pero sin retorcerla, para eliminar el exceso de agua. Deja secar al aire sin exponer al sol ni a otras fuentes de calor (radiadores).

**MANTENIMIENTO:** Para conservarlas en buen estado es aconsejable guardarlas en un lugar seco sin exponer al sol. Evitar que la banda de silicona entre en contacto con disolventes, pomadas, lociones o cremas hidratantes, que harían disminuir la adherencia. La posible formación de pequeños nudos de fibras es causada por el rozamiento con otras prendas de vestir o calzado y no afectan a la calidad de la media. Es imprescindible realizar con regularidad la pedicura y llevar calzado adecuado en perfecto estado. Quedan excluidos de la garantía los vicios que resulten del desgaste normal o de un uso inadecuado. Por uso inadecuado se entiende también una modificación posterior del producto que no haya sido realizada por el fabricante. Con un almacenaje adecuado, la durabilidad de las medias de compresión está concebida para 3 años. Al usarlas con regularidad y cuidarlas debidamente la eficacia terapéutica está limitada a 6 meses. El producto ha sido concebido para ser utilizado por un solo paciente.

### FARMALASTIC NOVUM ELEGANT

#### INDICACIONES

Telangectasias (arañas vasculares). Prevención en casos sin signos visibles o de riesgo leve. Prevención en viajes en avión o vehículo terrestre. Prevención en personas que pasan mucho tiempo sentadas o de pie.

#### CONTRAINDICACIONES, RIESGOS Y EFECTOS SECUNDARIOS

Relativas: Alergia a los materiales de la media.

LAVADO

### FARMALASTIC NOVUM INTELLIGENT PLUS

#### INDICACIONES

Varicosis primaria y secundaria. Insuficiencia venosa crónica. Edemas y alteraciones varicosas durante el embarazo. Hinchazones edematosas de causas diversas, incluso postraumáticas y/o postoperatorias. Tromboflebitis y como coadyuvante en caso de flebotrombosis. Síndrome postrombótico. Tras intervenciones quirúrgicas venosas y como coadyuvante en escleroterapia. Linfedema y lipedema. Angiodisplasia. Estados congestivos debidos a inmovilidad (p.e. en paresias o parálisis parciales de la extremidad inferior, síndrome congestivo artrógeno). Profilaxis de la trombosis y de las úlceras.

#### CONTRAINDICACIONES, RIESGOS Y EFECTOS SECUNDARIOS

**Absolutas:** enfermedad obstructiva arterial periférica en estado avanzado. Insuficiencia cardiaca descompensada. Flebitis séptica. Flegmasia cerulea dolens.

**Relativas:** alergia a los materiales de la media. Dermatitis húmedas. Disestesias (p.e. neuropatía periférica en estado avanzado por diabetes mellitus). Poliartritis crónica. Trastornos graves de la sensibilidad en las extremidades.

**Riesgos y efectos secundarios:** las medias de compresión que no se ajusten perfectamente pueden producir necrosis cutáneas, daños por presión en los nervios periféricos, así como trombosis venosas profundas en las piernas.

LAVADO